



LA TECHNOLOGIE D'IMAGERIE ÉPROUVÉE THINPREP® ASSOCIÉE À L'EXAMEN DES LAMES RÉUNIS DANS UN SEUL ET MÊME SYSTÈME

Utilisez la technologie d'imagerie ThinPrep pour standardiser vos lectures en cytologie.

Imagerie

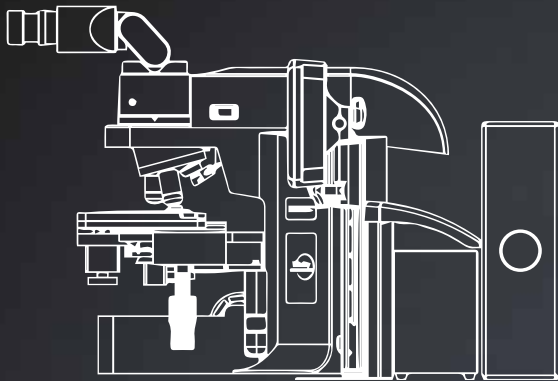
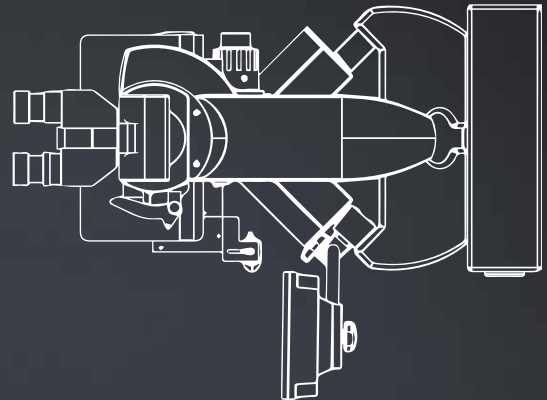
- Chaque lame est imagée en 90 secondes environ
- Chaque cellule et chaque groupe de cellules présents sur la lame sont scannés
- Les coordonnées des 22 champs les plus caractéristiques sont identifiés et stockés

Plus de confort

- Le Thinprep Integrated imager peut également servir de microscope traditionnel tout en permettant un gain d'espace précieux
- Écran tactile convivial et commandes ergonomiques des étapes et de l'examen
- L'alignement automatique avec repères permet un gain de temps et augmente la précision
- La fonction post-examen automatisée permet de vérifier l'intégrité des données

Lecture

- Se comporte comme un microscope automatisé, présentant les 22 champs observés
- Le processus de double lecture associe l'expérience humaine et la puissance de l'imagerie informatisée pour proposer une solution supérieure à votre laboratoire
- Si des anomalies sont identifiées dans les cellules, la lame est complètement vérifiée
- Si les 22 champs observés sont normaux, la lame peut être rendue comme normale
- Ne se concentrant que sur les cas anormaux, le cytotechnicien peut réaliser un dépistage plus efficace

VUE DE
CÔTÉ46 cm
(18 po)68 cm
(27 po)VUE DU
DESSUS56 cm
(22 po)68 cm
(27 po)

CARACTÉRISTIQUES DU THINPREP® INTEGRATED IMAGER



Dimensions

Largeur : 56 cm/22 po
Hauteur : 46 cm/18 po
Profondeur : 68 cm/27 po

Poids

31 kg/68 lbs

Température de fonctionnement

16-32 °C/60-90 °F

Humidité de fonctionnement

20-80 % HR sans condensation

Tension électrique

100-120 V/220-240 V monophasé

Fréquence

50/60 Hz ± 10 %

Diagnostic Solutions | Hologic.fr | france@hologic.com

Le ThinPrep® Integrated Imager est un système automatisé de visualisation et d'analyse sur ordinateur à utiliser avec les lames d'échantillons cytologiques cervicaux ThinPrep. • Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d'utilisation du (des) système(s) et sur les étiquettes et/ou les notices d'utilisation des réactifs. • Fabricant : Hologic Inc (USA) • Numéro interne : PB-00484-FRA-FR Rev 001 • 10/2016. © 2016 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Science of Sure, ThinPrep, UroCyté et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ou la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de podcasts et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, contactez votre représentant Hologic ou écrivez à france@hologic.com.

ThinPrep®
INTEGRATED IMAGER