

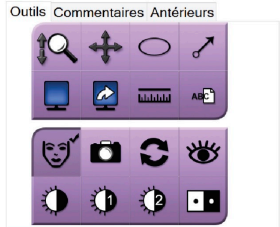



10 Vérifiez l'image.

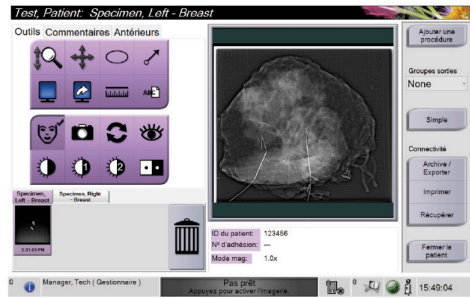



11 Archivez ou exportez les images, puis fermez le patient.

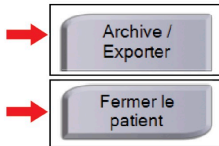

12 Retirez le plateau de spécimens de l'armoire d'imagerie. Suivez les directives du site sur la manipulation des spécimens.

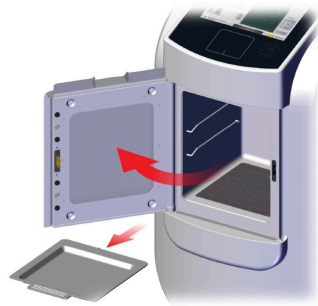

13 Éteignez le système.

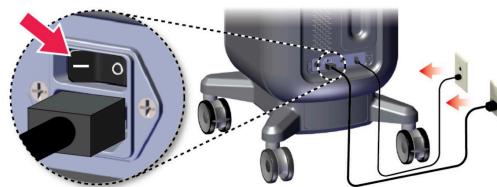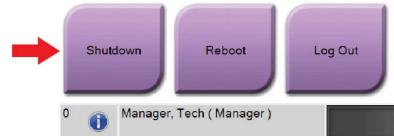

# Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

## GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



- 1 Moniteur d'affichage d'image
- 2 Affichage des commandes avec Pavé tactile intégré et Bouton d'activation des rayons X
- 3 Armoire d'imagerie

**⚠ Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations relatives à la sécurité et des instructions complètes.**


1 Déplacez la console vers l'emplacement adéquat.



2 Verrouillez les roulettes.



3 Branchez le système à l'alimentation électrique et au réseau.

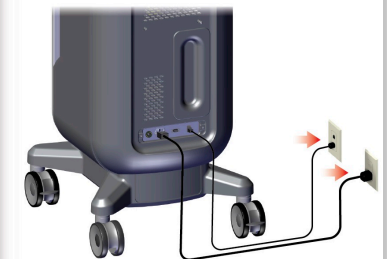

Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1.877.371.4372

Brazilian Imex Medical Group do Brasil  
Contact: Rua das Embaúbas, 601- Fazenda  
Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**



Référez-vous au site Web de l'entreprise pour connaître les différentes installations dans le monde.  
© 2019 Hologic, Inc. Imprimé aux États-Unis. La version originale du présent guide est rédigée en anglais.

Hologic, Faxitron, Trident et les logos associés sont des marques commerciales et/ou déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers, comme indiqué sur le site www.Hologic.com/patents.


MAN-05480-902 Rev. 004

**HOLOGIC®**


4 Démarrez le système et connectez-vous.

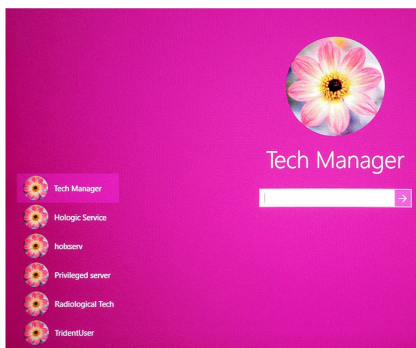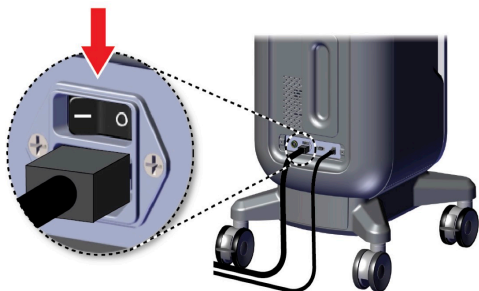


5 Sélectionnez le patient et la procédure.

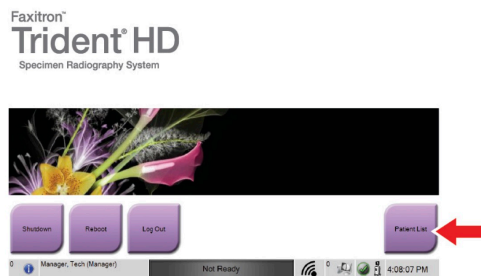


Nom	Date de naiss...	Examen
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

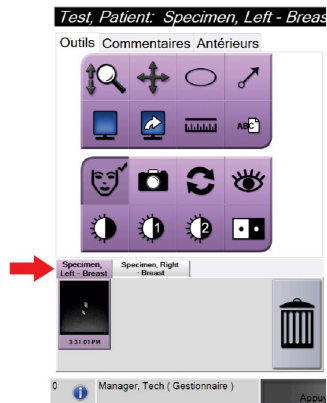

6 Préparez le spécimen selon les directives du site et centrez-le sur le plateau de spécimens.

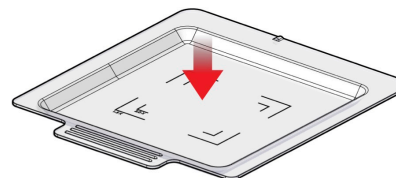

7 Positionnez le plateau de spécimens dans l'armoire d'imagerie en fonction du niveau d'agrandissement souhaité.

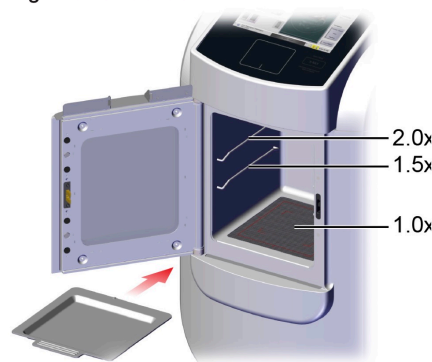

8 Fermez la porte.



9 Procédez à l'acquisition de l'image.

